

Manuel d'utilisation

Série 6714



NS6714T

1 Moteur



NS6714TA

2 Moteurs



NS6714TB

3 Moteurs

A propos de ce manuel

Ce manuel doit uniquement être utilisé comme référence pour l'utilisation de ce modèle spécifique.

Si le manuel est utilisé à d'autres fins, le fournisseur ne saurait être tenu responsable des conséquences qui en découlent.

Avertissements

L'alimentation électrique doit être coupée lors du changement de composants électriques, de l'entretien ou du nettoyage des machines.

La prise doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre afin de prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique.

Ne montez pas sur cet équipement.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'équipement et placez-le hors de leur portée.

Veuillez ajuster le dossier à la position la plus haute lorsque vous quittez l'équipement.

Ne placez pas l'équipement dans des endroits humides, tels que la salle de bain, afin d'éviter les risques de choc électrique ou autres dysfonctionnements.

Gardez également les contrôleurs à l'écart de l'eau.

Ne placez pas et n'utilisez pas l'équipement dans des endroits où de la peinture/revêtement est en cours d'application ou où de l'oxygène est fourni.

Sauf sous surveillance ou instruction d'un personnel qualifié et responsable, les personnes ayant des handicaps physiques, des troubles sensoriels, des troubles mentaux, un manque d'expérience ou de bon sens, ainsi que les enfants, ne sont pas autorisés à utiliser cet équipement.

En cas de dommage à la prise, veuillez contacter un distributeur, un centre de service ou un professionnel qualifié et expérimenté pour effectuer les réparations afin d'éviter tout danger.

Veuillez vous assurer qu'aucun objet accessible ne se trouve dans la course de mouvement du lit lors de son utilisation.

L'utilisation de l'équipement doit être effectuée par des professionnels formés.

Utilisation à l'intérieur uniquement.

Précautions

L'équipement doit être utilisé par une personne expérimentée, familière avec la structure, les performances et les instructions du produit, et chargée de son entretien régulier.

Lisez attentivement ce manuel avant l'installation, l'utilisation et les réglages, et conservez-le soigneusement.

Ce produit ne doit pas être utilisé pour un travail de charge sur un seul côté ou un seul point.

Respectez les règles de sécurité en matière d'utilisation :

Ne surchargez pas l'équipement afin de garantir le bon fonctionnement des dispositifs de protection.

Éliminez rapidement tout facteur de risque.

Serrez régulièrement les boulons et les écrous pour éviter toute défaillance due au desserrage, au glissement, aux vibrations ou à la chute de pièces.

Lors de l'entretien, l'opérateur ne doit pas démonter les pièces du lit sans autorisation.

Le produit ne doit pas être utilisé en cas de panne.

Si un phénomène ou un bruit anormal est détecté, l'équipement doit être immédiatement arrêté pour inspection et ne pourra être remis en service qu'après résolution du problème.

L'opérateur doit être parfaitement informé des précautions décrites dans chaque section du manuel afin de garantir la sécurité des personnes et du produit.

Ce lit électrique de soins est équipé d'un cordon d'alimentation à trois fils.

Celui-ci doit être branché sur une prise à trois pôles correctement installée et mise à la terre.

Cela permet non seulement d'éviter les risques de choc électrique, mais aussi d'assurer le bon fonctionnement du lit.

Veuillez utiliser l'équipement en stricte conformité avec les étiquettes d'avertissement apposées sur le produit.

Lors du réglage de la hauteur du lit, le bouton doit être maintenu enfoncé jusqu'à ce que le lit atteigne la position souhaitée.


Attention : la durée maximale de fonctionnement continu du moteur est de 2 minutes en marche (ON).

L'entretien doit être effectué par des professionnels qualifiés.

Après chaque utilisation, nettoyez la poussière et les taches sur le cuir ou les parties en bois à l'aide d'un produit neutre.

Lors du réglage du dossier, du coussin d'assise, du repose-pieds ou de la hauteur du lit à l'aide de la commande manuelle ou de la pédale, veillez à garder vos mains, vos pieds et votre tête à l'écart des parties mobiles.

(Voir l'illustration à droite.)

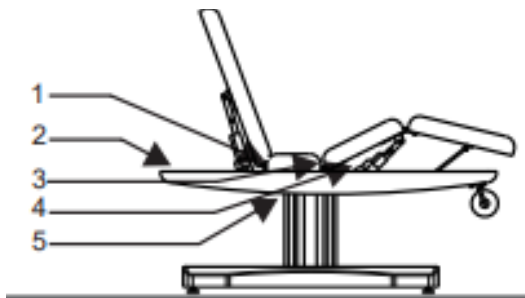

Gamme d'application

Ces produits conviennent aux soins de beauté et aux massages

Installation


Placez le lit à un emplacement approprié, en tenant compte de l'agencement général, de l'éclairage naturel ou artificiel et des conditions d'utilisation du salon ou de la maison. Assurez-vous qu'il se trouve dans un environnement propre, sec et frais.

Ouvrez le carton d'emballage et vérifiez que le lit est intact et que tous les accessoires ou pièces de rechange sont complets. En cas de problème, veuillez contacter le distributeur ou notre service.

Installation

Assurez-vous que le lit est placé sur un sol stable et plat afin d'éviter tout accident.

Branchez correctement la prise sur l'alimentation électrique. (Voir les détails ci-dessous.)

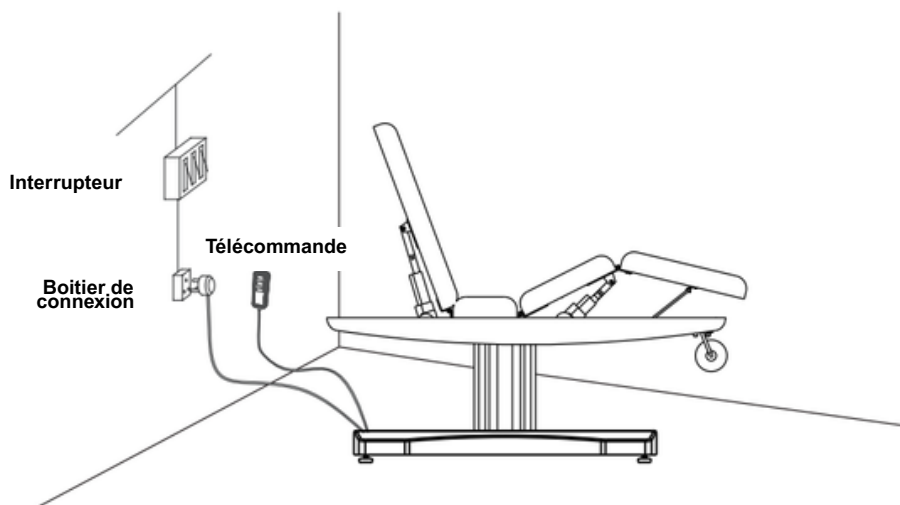

Structure du produit

Ce lit se compose d'un boîtier de commande, d'un moteur, de matériel, de pièces en plastique et de cuir. Le boîtier de commande contrôle le fonctionnement des moteurs et de la commande manuelle.

Ce lit comprend le réglage de l'angle du dossier et du coussin d'assise, ainsi que le réglage de l'élévation de l'ensemble du lit, qui constitue une structure globale et intégrale.

NS6714T




- ① Inclinaison manuelle du dossier
- ② Ajustement électrique de la hauteur

NS6714TA



- ① Inclinaison électrique du dossier
- ② Ajustement électrique de la hauteur

NS6714TB

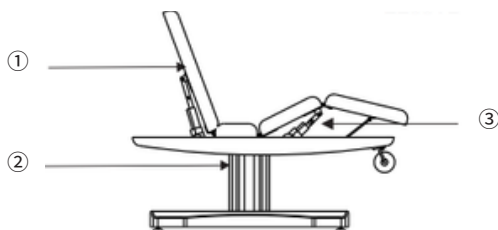


- ① Inclinaison électrique du dossier
- ② Ajustement électrique de la hauteur
- ③ Inclinaison électrique de l'assise


Instructions

NS6714T

Configuration standard de la télécommande

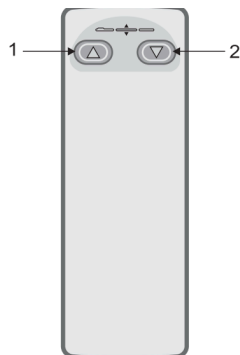


Configuration standard des pédales de commande

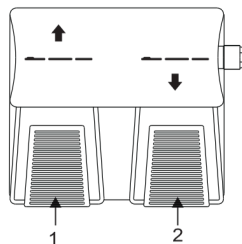


1. Le lit monte entièrement : Le lit monte en douceur en appuyant sur le bouton.
2. Le lit descend entièrement : Le lit descend en douceur en appuyant sur le bouton.

NS6714TA

Configuration standard de la télécommande

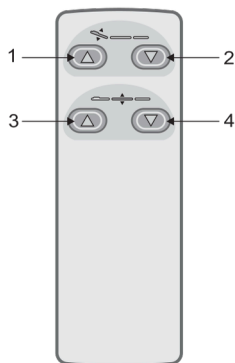


Configuration standard des pédales de commande

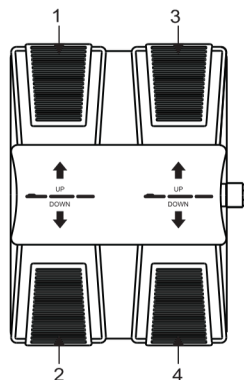


1. Le dossier monte : Le dossier monte en douceur en appuyant sur le bouton.
2. Le dossier descend : Le dossier descend en douceur en appuyant sur le bouton.
3. Le lit monte entièrement : Le lit monte en douceur en appuyant sur le bouton.
4. Le lit descend entièrement : Le lit descend en douceur en appuyant sur le bouton.

NS6714TB

Configuration standard de la télécommande

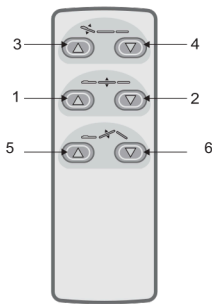

Configuration standard des pédales de commande

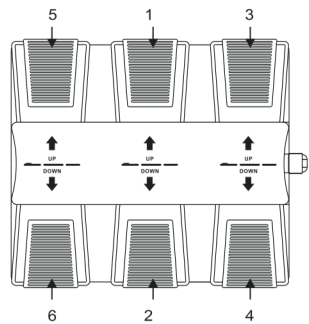

- 1. Le dossier se lève : Le dossier se lève doucement en appuyant sur le bouton.
- 2. Le dossier s'abaisse : Le dossier s'abaisse doucement en appuyant sur le bouton.
- 3. Lit entier se lève : Le lit se lève doucement en appuyant sur le bouton.
- 4. Lit entier s'abaisse : Le lit s'abaisse doucement en appuyant sur le bouton.
- 5. Coussin de siège se lève : Le siège s'incline doucement en appuyant sur le bouton.
- 6. Coussin de siège s'abaisse : Le siège s'aplatit doucement en appuyant sur le bouton.



Notes :

Différentes télécommandes doivent être choisies en fonction de la configuration.



Paramètres techniques

Alimentation	AC 100-120V or AC 220-240V or AC 100-240V, 50/60Hz
Max alimentation	300W
Température de l'environnement	0 °C~+40°C
Humidité relative	30% ~90%
Poids max supporté	175 kg
Dimensions des colis	2045×805×720mm
Poids net	83kg
Poids brut	95kg



NS6714T

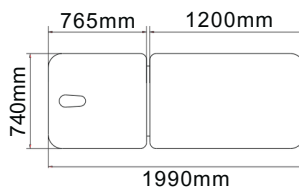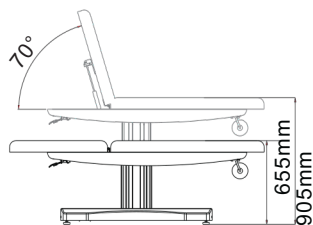

NS6714TA

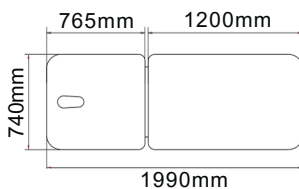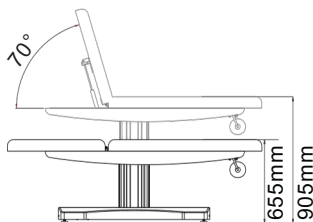

NS6714TB


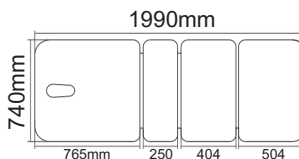
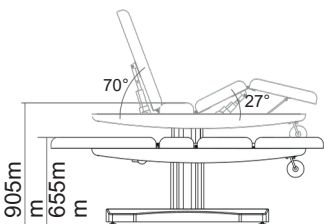


Maintenance

Après chaque traitement, n'utilisez qu'une solution neutre pour éliminer la poussière et les taches sur le cuir, sur le cuir, les parties métalliques ou le revêtement en plastique. Les solutions désinfectantes telles que l'alcool, l'acide ou les solutions alcalines sont interdites. Cela permet d'éviter de réduire la durée de vie du cuir et du revêtement en plastique.

2. Veuillez lubrifier les pièces mobiles régulièrement (une fois par an).

Diagramme des circuits

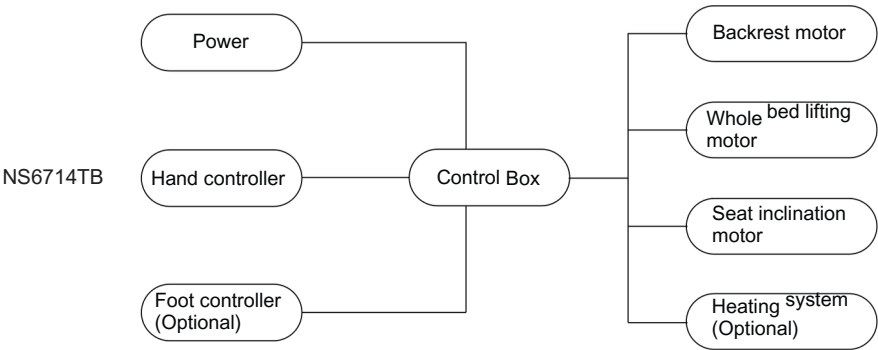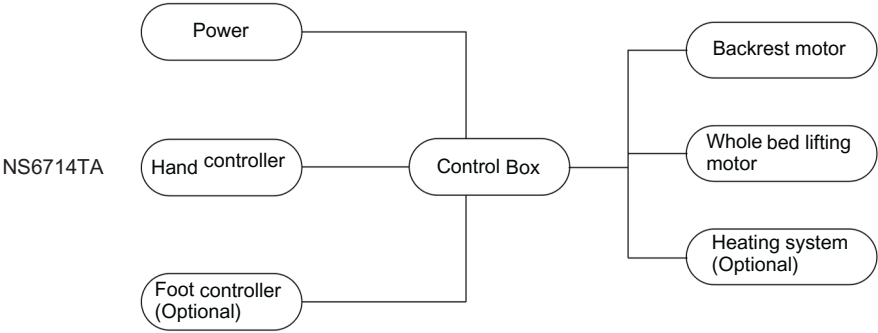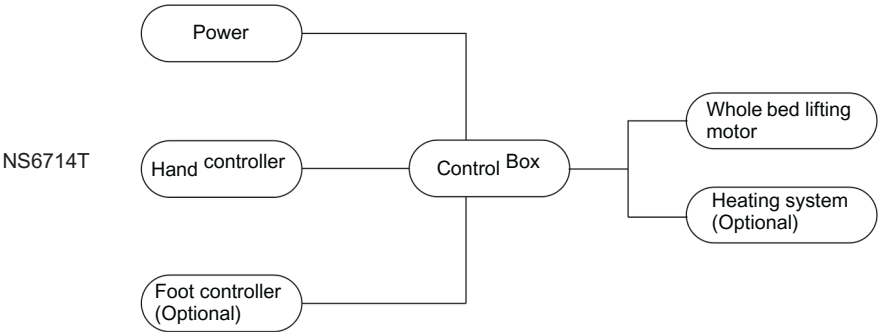

Phénomène de panne

Impossible de monter ou descendre normalement

Raison 1: Le cordon d'alimentation n'est pas connecté ou mal branché.

Solution 1 : Connectez le cordon d'alimentation ou branchez-le correctement.

Raison 2: Mauvaise qualité de la télécommande manuelle ou de la pédale.

Solution 2 : Remplacez la télécommande manuelle ou la pédale.

Raison 3: Mauvaise qualité du boîtier de commande.

Solution 3 : Veuillez contacter le centre de maintenance ou le fournisseur pour le dépannage.

Raison 4: Rupture du fil du moteur.

Solution 3 : Veuillez contacter le centre de maintenance ou le fournisseur pour le dépannage.

Raison 5: Moteur endommagé.

Solution 3 : Veuillez contacter le centre de maintenance ou le fournisseur pour le dépannage.

Son anormal

Raison 1: Les pièces rotatives manquent d'huile lubrifiante.

Solution 1 : Ajouter de l'huile lubrifiante.

Raison 2: Les positions rotatives (telles que les charnières, les ensembles POM) manquent d'huile lubrifiante.

Solution 2 : Ajouter de l'huile lubrifiante.

Raison 3: Problèmes de qualité du moteur.

Solution 3 : Remplacer le moteur.

Si le problème n'est toujours pas résolu après les opérations ci-dessus, veuillez contacter le centre de maintenance ou le fournisseur pour le résoudre.



Manuel d'utilisation

Série 6714



NS6714T



NS6714TA



NS6714TB